

*Des essais in vitro ont démontré que le film transparent fait écran aux virus d'au moins 27 nm de diamètre, à condition que le pansement reste intact et ne présente aucune fuite.

◆ Indications d'utilisation :

Les pansements peuvent être utilisés pour recouvrir et protéger les sites de cathéters et les plaies, pour maintenir un environnement humide pour la cicatrisation ou pour faciliter le débridement autolytique, comme pansement secondaire, comme protection au-dessus d'une peau à risque, pour fixer des dispositifs sur la peau, pour recouvrir les brûlures au premier ou au deuxième degré et pour recouvrir et protéger les yeux. Ne pas utiliser le pansement en remplacement de sutures ou d'autres méthodes de sutures primaires des plaies.

◆ Avertissement :

L'utilisation du pansement pour recouvrir un patch d'administration de médicament pourrait accélérer l'absorption et renforcer le risque de surdose. Ne pas réutiliser ce produit. Une réutilisation pourrait entraîner une infection ou une autre maladie/blessure.

◆ Précautions :

1. Arrêter tout saignement sur le site avant d'appliquer le pansement.
2. Ne pas étirer le pansement pendant l'application car la tension pourrait créer une lésion cutanée.
3. S'assurer que la peau est propre, exempte de résidus de savon et de lotion et qu'elle a pu sécher correctement avant d'appliquer le pansement afin d'éviter toute irritation de la peau et de garantir une bonne adhésion.
4. Le pansement peut être utilisé sur un site infecté, uniquement par un professionnel de santé.
5. Les onguents antimicrobiens contenant des polyéthylènes glycols peuvent compromettre la solidité des pansements films transparents 3M™ Tegaderm™ HP.

◆ Utilisateurs prévus et mode d'emploi :

Les utilisateurs prévus sont les professionnels de santé qui respectent les instructions d'utilisation et les illustrations d'application sur la face arrière du pansement. Pour une adhésion optimale, appliquer une pression ferme mais délicate sur l'ensemble du pansement.

◆ Péréemption/Élimination :

Pour la durée de conservation, se référer à la date de péréemption imprimée sur chaque emballage. Si l'emballage stérile est endommagé ou ouvert involontairement avant utilisation, éliminer le produit et ne pas l'utiliser. Remarque : mettre le produit au rebut conformément au protocole de l'établissement.

◆ Informations destinées au client :

Veuillez signaler tout incident grave survenant en lien avec ce dispositif à 3M et à l'autorité compétente locale (UE) ou à l'autorité réglementaire locale. Pour plus d'informations, contacter votre représentant 3M local ou nous contacter sur le site 3M.com et sélectionner votre pays.

◆ Explication des symboles :

	Fabricant		Stérilisé par irradiation.		Sans latex de caoutchouc naturel.
	Date de fabrication.		Ne pas restituer.		Dispositif médical.
	A utiliser avant.		Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé et consulter le mode d'emploi.		Identifiant unique des dispositifs.
	Numéro de lot.		Ne pas réutiliser.		Importateur.
	Numéro de référence.		Consulter le mode d'emploi ou le mode d'emploi électronique.		Système de barrière stérile simple

CE 0297
Marquage CE

Made in USA - REF 1628, REF 1629
Made in Germany - REF 1626W
3M Deutschland GmbH
Health Care Business
Carl-Schurz-Str.1
41453 Neuss, Germany
34-2001-7903-3
0231387.1

Date de la dernière mise à jour de la notice : 2023-03
Pour plus d'information, voir HCB8Regulatory.3M.com
© 2024, 3M. Tous droits réservés.
3M et Tegaderm sont des marques de commerce de 3M.

Notice réf. : 990142, 10-2024

Sets pour plaies post-opératoires

Plaies inférieures à 5 cm - 3 soins

(ACL366002001062)

NOTICE D'EMPLOI

◆ Indications :

Nettoyage, protection et recouvrement des plaies post-opératoires suturées, non infectées, avec ou sans drain et des plaies modérément exsudatives.
Le pansement 3M™ Tegaderm™ Film est perméable à l'oxygène et à la vapeur d'eau, laissant ainsi respirer la peau. Il est imperméable aux liquides, bactéries et virus et permet la prise de douches.
Utilisateurs : professionnels de santé.
Groupe cible de patients: hommes et femmes sans limite d'âge, hors prématurés.

◆ Caractéristiques de performance :

Nécessaire de dispositifs médicaux stériles, prêts à l'emploi et à usage unique. Le blister est stérilisé à l'oxyde d'éthylène et les deux pansements sont stérilisés par irradiation.

◆ Composition :

Chaque blister contient 
- 1 champ imperméable absorbant
- 2 pinces à disséquer
- 5 compresses en non tissé 40g, 7,5x7,5cm

Hors blister :

- 3 pansements adhésifs stériles 3M™ Medipore™ + Pad 10x10cm 
- 3 pansements transparents stériles 3M™ Tegaderm™ Film 10x12cm 
- 3 sacs collecteurs de déchets
- 1 notice d'emploi

◆ Précautions d'emploi :

Ouvrir le set au dernier moment.
Ne pas utiliser les pansements ou les blisters si leur emballage est endommagé.
Ne pas utiliser en cas d'allergie à l'un des composants (fiches techniques disponibles auprès des fabricants).
Ne contient pas de latex.
Ne pas réutiliser le dispositif. En cas de réutilisation d'un dispositif médical à usage unique, il existe un risque de contamination, d'altération, de dysfonctionnement du produit.

◆ Conseils d'utilisation :

- Se laver les mains.
- S'enquérir de l'état du malade et de l'aspect de la plaie. Prendre connaissance du dossier de soin ou de la prescription médicale.
- Prendre un blister stérile pour un soin, détacher un sac collecteur de déchets et l'installer. Préparer les produits de nettoyage / d'antisepsie prescrits (non fournis).
- Ouvrir le blister. Étaler le champ et poser le blister sur ce plan de travail.
- Imprégner les compresses, disposées dans le blister, de solution de nettoyage.
- Effectuer délicatement le retrait du pansement et observer son état ainsi que l'état de la plaie pour détecter tout problème éventuel.
- Se laver les mains.
- Saisir les compresses avec une pince et nettoyer la plaie en respectant les 4 temps : détergence, rinçage, séchage, antisepsie.
- Recouvrir la plaie propre avec un pansement adhésif stérile 3M™ Medipore™ + Pad de la façon suivante : sortir le pansement de son sachet, ouvrir le 1er support papier, ce qui laisse apparaître une moitié adhésive du pansement.
- Centrer le pansement sur la plaie et poser le pansement (les bords doivent adhérer à une peau sèche et saine autour de la plaie). Pour éviter toute tension cutanée, poser sur les articulations fléchies.

Lisser les bords du pansement autour de la plaie pour bien adhérer à la peau.

Ne pas étirer le pansement lors de la pose, surtout en cas d'œdème sous-jacent, en raison du risque de lésions cutanées mécaniques.

Changer le pansement dès que l'exsudat traverse le support multi-extensible. Pour ôter le pansement, saisir délicatement un bord et tirer lentement dans le sens de la pousse des poils pour le détacher.

- Recouvrir par un pansement transparent 3M™ Tegaderm™ Film, en prenant soin de ne pas étirer le pansement pendant l'application, pour éviter tout risque de lésions cutanées.

Pour la pose consulter les illustrations figurant sur chaque sachet de pansement.

- Rassembler les déchets dans le sac collecteur qui devra être éliminé dans le circuit des déchets d'activité de soin.

♦ Conditions particulières de stockage, de manipulation et d'élimination :

Doit respecter les informations indiquées sur l'étiquette. Doit respecter les règles d'asepsie du geste médical. Doit respecter la réglementation en vigueur sur l'élimination des produits présentant un danger biologique.

Explication des symboles :



Ne pas réutiliser



Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé



Attention : consulter la notice d'instructions



Conserver à l'abri de l'humidité



Conserver à l'abri de la lumière du soleil

♦ Remarque :

Pour d'autres tailles de plaies post-opératoires, utiliser les sets post-opératoires:

ACL 3666002000065, pour les plaies inférieures à 10cm

ACL 3666002001109, pour les plaies supérieures à 10cm

♦ Assembleur : RAFFIN MEDICAL - 746 route de Sarcey

69490 Saint Romain de Popey - France

REF 400642-1

Tout incident grave survenu en lien avec le dispositif devra faire l'objet d'une communication au fabricant et à l'autorité compétente dans lequel l'utilisateur est établi.

3M, Tegaderm et Medipore sont des marques déposées de 3M

3M™ Medipore™ + Pad

Pansement adhésif stérile

♦ Description :

3M™ Medipore™ + Pad est un pansement stérile composé d'une compresse absorbante, non adhérente à la plaie, fixée sous un support multi-extensible plus large dont l'adhésif résiste à l'eau.

♦ Indications :

3M Medipore + Pad a été conçu pour être utilisé comme une barrière mécanique et pour l'absorption des exsudats des plaies aiguës.

♦ Utilisateurs prévus :

Les utilisateurs prévus sont les professionnels de la santé et les personnes non spécialisées qui suivent les instructions du professionnel et le mode d'emploi.

♦ Avertissements et précautions :

- 3M Medipore + Pad n'est pas fait pour remplacer une suture ou autre méthode de fermeture des plaies.
- Le pansement doit être changé en cas de mauvaise adhérence ou si l'exsudat traverse le support.
- Le site doit être surveillé pour déceler des signes éventuels d'infection. Devant des signes d'infection (rougeur, douleur, œdème, fièvre, odeur ou suppuration inhabituels), retirer le pansement et prendre les précautions d'usage.
- Suivez les instructions fournies par votre médecin et le mode d'emploi. Si la plaie ne commence pas à montrer des signes de guérison ou si d'autres symptômes inattendus apparaissent, consultez un professionnel de la santé.
- Effectuer l'hémostase du site de ponction du cathéter ou de la plaie avant d'appliquer le pansement.

6. La peau doit être sèche et sans résidus de détergents détersifs pour garantir une bonne adhérence.

7. Une lésion cutanée mécanique peut se produire si le pansement est étiré à la pose.

8. Utiliser avec prudence sur des zones très mobiles ou sur lesquelles un œdème important est à prévoir, en raison du risque de lésions cutanées mécaniques.

9. Medipore + Pad n'est pas destiné à être re-stérilisé

10. Produit à usage unique : lorsqu'on réutilise ce produit, ce dernier ne répond plus aux critères et, par conséquent, ne remplit plus son rôle.

♦ Mode d'emploi :

Suivez votre protocole de soins habituel pour l'utilisation de ce pansement. Préparation : se conformer au protocole standard pour préparer le site de la plaie. Pour garantir une meilleure adhérence du pansement, il peut être nécessaire de tondre le site. Le rasage n'est pas recommandé. Poser le pansement sur un site propre et sec. Le pansement doit être assez large pour que les bords adhèrent à une peau sèche et saine autour de la plaie.

1. Ouvrir le paquet et sortir un pansement.

2. Retirer le papier du dos du pansement, pour exposer la face adhésive.

3. Centrer le pansement sur la plaie et poser le pansement. Pour éviter toute tension cutanée, poser sur les articulations fléchies.

4. Lisser les bords du pansement autour de la plaie pour bien le faire adhérer à la peau.

5. Ne pas étirer le pansement lors de la pose, surtout en cas d'œdème sous-jacent.

6. Changer le pansement dès que l'exsudat traverse le support multi-extensible.

7. Pour ôter le pansement, saisir délicatement un bord et tirer lentement dans le sens de la pousse des poils pour le détacher

♦ Stockage /Durée de vie/ Élimination :

Conserver le pansement 3M Medipore + Pad à température ambiante pour conserver ses qualités. Éviter chaleur et humidité excessives. Pour connaître la date limite d'utilisation, voir la date d'expiration figurant sur chaque emballage.

♦ Mode de conditionnement et commande :

Conditionné en boîtes de pansements individuels stériles. Le pansement est stérile sauf emballage ouvert ou détérioré par inadvertance.

♦ Informations pour les clients :

Veillez signaler à 3M et à l'autorité locale compétente tout incident grave survenu en rapport avec le dispositif. Pour plus d'informations, veuillez contacter votre représentant 3M local ou nous contacter sur 3M.com et sélectionner votre pays.

♦ Explication des symboles :

	Fabricant		Stérilisé par irradiation.		Sans latex de caoutchouc naturel.
	Date de fabrication.		Ne pas restériliser.		Dispositif médical.
	A utiliser avant.		Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé et consulter le mode d'emploi.		Identifiant unique des dispositifs.
	Numéro de lot.		Ne pas réutiliser.		Importateur.
	Numéro de référence.		Consulter le mode d'emploi ou le mode d'emploi électronique.		Système de barrière stérile simple
	Marquage CE		Made in Poland		3M Deutschland GmbH
			Health Care Business		Carl-Schurz-Str.1
			41453 Neuss, Germany		Date de la dernière mise à jour de la notice : 2021-03
			For more information see, HCBRegulatory.3M.com		© 2022, 3M. All rights reserved. 3M is trademarks of 3M

Pansement film transparent avec cadre 3M™ Tegaderm

♦ Description du produit :

Les pansements comportent un support film fin avec un adhésif au potentiel allergisant et sans latex. Les pansements avec bordures présentent des encoches et sont renforcés d'un ruban en tissu doux pour renforcer l'étanchéité autour des cathéters et autres dispositifs. Ce pansement est perméable à l'oxygène et à la vapeur d'eau, permettant ainsi à la peau de respirer. Il est imperméable aux liquides, bactéries et virus.* Un pansement intact protège le site de toute contamination extérieure.