Sets pour plaies chroniques

Plaies chroniques d'une surface supérieure à 150 cm² et avec peau péri-lésionnelle saine.

Boîtes de 5 soins.

(ACL 36660020000416318743)

NOTICE D'EMPLOI

♦ Indications :

Nettoyage, protection et recouvrement des plaies chroniques d'une surface supérieure à 150 cm² présentant une peau péri-lésionnelle saine.

Le pansement 3M™ Tegaderm™ Film est perméable à l'oxygène et à la vapeur d'eau, laissant ainsi respirer la peau. Il est imperméable aux liquides, bactéries et virus* et permet la prise de douches.

♦ Composition :

Chaque blister contient : STERILE EO

- 1 champ imperméable absorbant 1 face
- 10 compresses en non tissé 40g, 10x10cm
- 2 pinces à disséquer

Hors blister:

- 5 pansements adhésifs stériles 3M™ Tegaderm™ Film 15x20cm STERILE R
- 5 sacs collecteurs de DASRI
- 1 notice d'emploi

Précautions d'emploi :

- Ouvrir le set au dernier moment.
- Ne pas utiliser les pansements ou les blisters si leur emballage est endommagé.
- Ne pas utiliser en cas d'allergies à l'un des composants (fiches techniques disponibles auprès des fabricants).
- Ne pas réutiliser le dispositif. En cas de réutilisation d'un dispositif médical à usage unique, il existe un risque de contamination, d'altération, de dysfonctionnement du produit.
- Ne contient pas de latex.

♦ Conseils d'utilisation :

- S'enquérir de l'état du malade et de l'aspect de la plaie. Prendre connaissance du dossier de soin et de la prescription médicale.
- Se laver les mains.
- Réunir le matériel : un blister (un blister pour un soin), un pansement adhésif, un sac collecteur de DASRI, et les autres éléments nécessaires à la réfection
- de ce pansement et non fournis ici (une paire de gant non stérile, des produits de détersion, de rinçage et d'antisepsie, et un premier pansement qui ira au contact de la plaie ; se référer à la prescription).
- Une fois auprès du patient, installer le sac collecteur et ouvrir le blister.
- Utiliser le champ imperméable comme champ de table (côté plastique contre la table).

Transférer le contenu du blister sur le champ de table de facon stérile.

- Imprégner les compresses des solutions de nettoyage.
- Avec des gants non-stériles, retirer délicatement le pansement,

Observer son état ainsi que l'état de la plaie pour évaluer son évolution.

- Se laver les mains.

- Effectuer le nettoyage de la plaie (cf prescription médicale). Avec une première pince effectuer la détersion, le rinçage et le séchage de la plaie. Avec la seconde pince effectuer l'antisepsie. - Recouvrir la plaie propre à l'aide du pansement prescrit non fourni dans ce set en prenant soin de bien centrer le pansement et d'éviter toute tension cutanée.
- Terminer en recouvrant le premier pansement par un pansement transparent 3M™ Tegaderm™ Film. Veiller à ne pas étirer le pansement pendant l'application, pour éviter tout risque de lésions cutanées. Lisser les bords du pansement. Pour plus d'information sur la pose du pansement 3M™ Tegaderm™ Film consulter les illustrations présentes sur chaque sachet de pansement.
- Trier les déchets, Eliminer le sac DASRI dans le circuit des déchets d'activité de soin.

Conditions particulières de stockage, de manipulation et d'élimination :

Doit respecter les informations indiquées sur l'étiquette. Doit respecter les règles d'asepsie du geste médical. Doit respecter la réglementation en vigueur sur l'élimination des produits présentant un danger biologique.

Explication des symboles :

Ne pas réutiliser

Ne pas restériliser

Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé

/ ou Ti Attention : consulter la notice d'instructions

STERILEEO

Stérilisé avec de l'oxyde d'éthylène

Conserver à l'abri de la lumière du soleil

Conserver à l'abri de l'humidité

Autres références disponibles :

Set pour plaies post-opératoires inférieures à 5 cm - Boîte de 3 soins - ACL 36660020010626318393 Set pour plaies post-opératoires inférieures à 10 cm - Boîte de 3 soins - ACL 36660020000656318683 Set pour plaies post-opératoires supérieures à 10 cm - Boîte de 3 soins - ACL 36660020011096318312

Assembleur: RAFFIN MEDICAL - 746 route de Sarcey

REF 400668

69490 Saint Romain de Popey - France

Tout incident grave survenu en lien avec le dispositif devra faire l'obiet d'une communication au fabricant et à l'autorité compétente dans lequel l'utilisateur est établi.

3M et Tegaderm sont des marques déposées de 3M.

Pansement film transparent avec cadre 3M™ Tegaderm

Description du produit :

Les pansements comportent un support film fin avec un adhésif au potentiel allergisant et sans latex. Les pansements avec bordures présentent des encoches et sont renforcés d'un ruban en tissu doux pour renforcer l'étanchéité autour des cathéters et autres dispositifs. Ce pansement est perméable à l'oxygène et à la vapeur d'eau, permettant ainsi à la peau de respirer. Il est imperméable aux liquides, bactéries et virus.* Un pansement intact protège le site de toute contamination extérieure.

*Des essais in vitro ont démontré que le film transparent fait écran aux virus d'au moins moins 27 nm de diamètre, à condition que le pansement reste intact et ne présente aucune fuite.

Indications d'utilisation :

Les pansements peuvent être utilisés pour recouvrir et protéger les sites de cathéters et les plaies, pour maintenir un environnement humide pour la cicatrisation ou pour faciliter le débridement autolytique, comme pansement secondaire, comme protection au-dessus d'une peau à risque, pour fixer des dispositifs sur la peau, pour recouvrir les brûlures au premier ou au deuxième degré et pour recouvrir et protéger les yeux. Ne pas utiliser le pansement en remplacement de sutures ou d'autres méthodes de

sutures primaires des plaies.

♦ Avertissement :

L'utilisation du pansement pour recouvrir un patch d'administration de médicament pourrait accélérer l'absorption et renforcer le risque de surdose. Ne pas réutiliser ce produit. Une réutilisation pourrait entraîner une infection ou une autre maladie/blessure.

Précautions :

- 1. Arrêter tout saignement sur le site avant d'appliquer le pansement.
- 2. Ne pas étirer le pansement pendant l'application car la tension pourrait créer une lésion cutanée.
- 3. S'assurer que la peau est propre, exempte de résidus de savon et de lotion et qu'elle a pu sécher correctement avant d'appliquer le pansement afin d'éviter toute irritation de la peau et de garantir une bonne adhésion.
- 4. Le pansement peut être utilisé sur un site infecté, uniquement par un professionnel de santé.
- 5. Les onquents antimicrobiens contenant des polyéthylènes glycols peuvent compromettre la solidité des pansements films transparents 3M™ Tegaderm™ HP.

Utilisateurs prévus et mode d'emploi :

Les utilisateurs prévus sont les professionnels de santé qui respectent les instructions d'utilisation et les illustrations d'application sur la face arrière du pansement. Pour une adhésion optimale, appliquer une pression ferme mais délicate sur l'ensemble du pansement.

♦ Péremption/Élimination :

Pour la durée de conservation, se référer à la date de péremption imprimée sur chaque emballage. Si l'emballage stérile est endommagé ou ouvert involontairement avant utilisation, éliminer le produit et ne pas l'utiliser. Remarque : mettre le produit au rebut conformément au protocole de l'établissement.

Informations destinées au client :

Veuillez signaler tout incident grave survenant en lien avec ce dispositif à 3M et à l'autorité compétente locale (UE) ou à l'autorité réglementaire locale. Pour plus d'informations, contacter votre représentant 3M local ou nous contacter sur le site 3M.com et sélectionner votre pays.

Explication des symboles :



Fabricant

Date de fabrication.

A utiliser avant. Numéro de lot.

LOT REF

C € 0297

Marquage CE

Numéro de référence.

STERILE R Stérilisé par irradiation. Ne pas restériliser.

Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé et consulter le mode d'emploi.



Ne pas réutiliser.

Consulter le mode d'emploi ou le mode d'emploi électronique.



Sans latex de caoutchouc naturel



Identifiant unique des



dispositifs.



Importateur. Système de barrière stérile



Made in USA - REF 1628, REF 1629 Made in Germany - REF 1626W 3M Deutschland GmbH Health Care Business Carl-Schurz-Str.1

41453 Neuss, Germany 34-2001-7906-6

02313861

Date de la dernière mise à jour de la notice : 2023-03 Pour plus d'information, voir HCBGregulatory.3M.com © 2024, 3M. Tous droits réservés.

3M et Tegaderm sont des marques de commerce de

Notice réf.: 990226, 10-2024