

Indications

Set destiné au nettoyage, à la protection et recouvrement des plaies post-opératoires suturées et non infectées permettant l'ablation des fils (sets de pansements post-opératoire petites, moyennes et grandes plaies) et des agrafes (set de pansements post-opératoire grandes plaies avec ôte-agraves).

Groupe cible de patients et d'utilisateurs

Le set doit être utilisé par des professionnels de santé formés au soin des plaies.

Caractéristiques de performance et bénéfice clinique

Set de soins prêt à l'emploi, stériles et à usage unique, permettant un gain de temps et uneminimisation des risques de contamination.

Contre-indications et mises en garde

Ne pas utiliser le pansement film adhésif transparent sur une plaie post-opératoire suturée présentant des signes d'infection.

Précautions d'emploi

Ne pas utiliser si les emballages primaires sont endommagés ou ouverts avant l'utilisation. Ne pas réutiliser les dispositifs médicaux inclus dans le set (risque de contamination, d'altération ou de dysfonctionnement du produit).

Conditions de stockage

Conservé dans un endroit bien ventilé à une température inférieure à 40 °C et un taux d'humidité inférieure à 80%.

Mode d'emploi

- Réaliser une hygiène des mains à l'aide d'une solution hydro-alcoolique selon les recommandations en vigueur.
- Prendre connaissance de la prescription médicale et/ou du dossier de soin du patient.
- Préparer le matériel pour la réalisation du soin :
- Installer le sac collecteur de déchets à proximité du plan de travail.
- Sortir les pansements stériles.
- Préparer les instruments pour le retrait des fils ou agraves si applicable.
- Préparer les produits de rinçage et/ou antiseptique éventuellement prescrits.
- Réaliser une hygiène des mains à l'aide d'une solution hydro-alcoolique selon les recommandations en vigueur.
- Ouvrir le blister, prélever le champ et l'installer sur un support à proximité du patient afin de délimiter une zone stérile.
- Prélever les pinces anatomiques stériles en les saisissant par les extrémités distales et les utiliser pour disposer les compresses sur le champ.
- Procéder au retrait du pansement souillé et l'évacuer dans le sac collecteur de déchets. Ce dernier sera ensuite éliminé dans le circuit des déchets d'activité de soins.

- Réaliser une hygiène des mains à l'aide d'une solution hydro-alcoolique selon les recommandations en vigueur.

- Nettoyer et sécher la plaie selon le protocole prescrit. Jeter les compresses souillées dans le sac collecteur de déchets.

- Utiliser la paire de ciseaux stérile présente dans le set moyennes plaies afin d'adapter le pansement à la taille et forme de la plaie.

- Utiliser le ôte-agraves stérile présent dans le set grandes plaies avec ôte-agraves pour retirer les agraves.

- Recouvrir la plaie à l'aide des pansements fournis dans le set :

- Appliquer le pansement adhésif stérile avec compresse centrale comme pansement primaire.

- Appliquer le pansement film adhésif transparent stérile comme pansement secondaire en suivant la numérotation des feuillets. Veiller à ce qu'il recouvre le pansement primaire en dépassant sur chaque bord pour assurer l'étanchéité de l'ensemble. Lisser les bords afin qu'il adhère à la peau.

- Rassembler les déchets (hors coupants, piquants, tranchants) dans le sac collecteur et éliminer ce dernier en suivant les circuits adaptés à ce type de déchets.

- Effectuer une traçabilité dans le dossier de soins infirmiers.

- Réaliser une hygiène des mains à l'aide d'une solution hydro-alcoolique selon les recommandations en vigueur.

Remarques générales

En cas d'incident grave, veuillez-vous adresser au fabricant et aux autorités sanitaires compétentes.

Effets secondaires indésirables

Aucun connu à ce jour. Tout incident grave survenu en lien avec le set devra faire l'objet d'une communication auprès du fabricant et de l'autorité compétente du pays dans lequel l'utilisateur est établi.

Conditions de stockage

Conservé le produit dans un endroit sec, frais et à l'abri de la lumière.

Élimination

Une élimination sûre doit respecter la réglementation en vigueur sur l'élimination des produits présentant un danger biologique.

Information à transmettre au patient s'il n'est pas utilisateur

Tout risque résiduel, contre-indications, mises en garde, effet secondaire indésirable.

Signification des symboles :

	Ne pas réutiliser
	Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé
	Système de barrière stérile unique
	Stérilisé par irradiation
	Stérilisé à l'oxyde d'éthylène
	Date limite d'utilisation
	Code de lot
	Date de production
	Attention
	Ne pas restériliser
	Conserver à l'abri de la lumière du soleil
	Dispositif Médical
	Numéro CE
	Consulter les instructions d'utilisation
	Fabricant
	Représentant autorisé dans l'Union européenne
	Importateur
	Distributeur
	Référence catalogue

Date de la dernière révision de la

notice : 08-2021

Numéro de révision : 00

Référence : 990264 / 08-2021

Assembleur :

RAFFIN MEDICAL

746 route de Sarcey

69490 Saint-Romain-de-Popey,

France



Distributeur :

AGETI France

30 Ch. des Tuileries

13015 Marseille – France

contact@ageti.fr



990264 / 08-2021

GAMME DE SETS DE PANSEMENTS POST-OPERATOIRE

Pour d'autres tailles de plaies post-opératoires :

DÉSIGNATION	NOMBRE DE SOINS PAR BOÎTE	CODE EAN
SET DE PANSEMENTS POST-OPERATOIRE Petites plaies avec 1 coupe-fils stérile	3	3701063800220
SET DE PANSEMENTS POST-OPERATOIRE Moyennes plaies avec 1 coupe-fils et 1 paire de ciseaux stériles	3	3701063800213
SET DE PANSEMENTS POST-OPERATOIRE Grandes plaies avec 1 coupe-fils stérile	3	3701063800206
SET DE PANSEMENTS POST-OPERATOIRE Grandes plaies avec 1 ôte-agrafes stérile	3	3701063800190