

Indications

Set destiné au nettoyage, à la protection et recouvrement des plaies chroniques avec peau périlésionnelle saine.

Groupe cible de patients et d'utilisateurs

Le set doit être utilisé par des professionnels de santé formés au soin des plaies.

Caractéristiques de performance et bénéfice clinique

Set de soins prêt à l'emploi, stériles et à usage unique, permettant un gain de temps et une minimisation des risques de contamination.

Contre-indications et mises en garde

Ne pas utiliser le pansement film adhésif transparent sur une plaie post-opératoire suturée présentant des signes d'infection.

Précautions d'emploi

Ne pas utiliser si les emballages primaires sont endommagés ou ouverts avant l'utilisation. Ne pas réutiliser les dispositifs médicaux inclus dans le set (risque de contamination, d'altération ou de dysfonctionnement du produit).

Conditions de stockage

Conservé le produit dans un endroit sec, frais et à l'abri de la lumière.

Mode d'emploi

Réaliser une hygiène des mains à l'aide d'une solution hydro-alcoolique selon les recommandations en vigueur.

Prendre connaissance de la prescription médicale et/ou du dossier de soin du patient.

Préparer le matériel pour la réalisation du soin :

Installer le sac collecteur de déchets à proximité du plan de travail.

Sortir les pansements stériles.

Préparer les instruments nécessaire pour le méchage ou la détersion de la plaie si applicable.

Préparer les produits de rinçage et / ou antiseptie éventuellement prescrits.

Réaliser une hygiène des mains à l'aide d'une solution hydro-alcoolique selon les recommandations en vigueur.

Ouvrir le blister, prélever le champ et l'installer sur un support à proximité du patient afin de délimiter une zone stérile.

Prélever les pinces anatomiques stériles en les saisissant par les extrémités distales et les utiliser pour disposer les compresses sur le champ.

Procéder au retrait du pansement souillé et l'évacuer dans le sac collecteur de déchets. Ce dernier sera ensuite éliminé dans le circuit des déchets d'activité de soins.

Réaliser une hygiène des mains à l'aide d'une solution hydro-alcoolique selon les recommandations en vigueur.

Nettoyer et sécher la plaie selon le protocole prescrit. Jeter les compresses souillées dans le sac collecteur de déchets.

Utiliser la paire de ciseaux stérile afin d'adapter le pansement à la taille et forme de la plaie.

Utiliser le stylet présent dans le set standard pour sonder et /ou mécher la plaie conformément à la prescription médicale.

Utiliser la curette présente dans le set détersion pour nettoyer la plaie conformément à la prescription médicale. La curette présente deux extrémités en forme de cuillère de tailles différentes.

Recouvrir la plaie à l'aide des pansements film adhésif transparent stériles fournis dans le set. Veiller à ce qu'il recouvre le pansement primaire prescrit en dépassant sur chaque bord pour assurer l'étanchéité de l'ensemble. Lisser les bords afin qu'il adhère à la peau.

Rassembler les déchets (hors coupants, piquants, tranchants) dans le sac collecteur et éliminer ce dernier en suivant les circuits adaptés à ce type de déchets.

Réaliser une hygiène des mains à l'aide d'une solution hydro-alcoolique selon les recommandations en vigueur.

Effectuer une traçabilité dans le dossier de soins infirmiers.

Remarques générales

En cas d'incident grave, veuillez-vous adresser au fabricant et aux autorités sanitaires compétentes.

Effets secondaires indésirables

Aucun connu à ce jour. Tout incident grave survenu en lien avec le set devra faire l'objet d'une communication auprès du fabricant et de l'autorité compétente du pays dans lequel l'utilisateur est établi.

Conditions de stockage

Conservé le produit dans un endroit sec, frais et à l'abri de la lumière.

Élimination

Une élimination sûre doit respecter la réglementation en vigueur sur l'élimination des produits présentant un danger biologique.

Information à transmettre au patient s'il n'est pas utilisateur

Tout risque résiduel, contre-indications, mises en garde, effet secondaire indésirable.

Signification des symboles :

	Ne pas réutiliser
	Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé
	Système de barrière stérile unique
	Stérilisé à l'oxyde d'éthylène
	Date limite d'utilisation
	Code de lot
	Date de production
	Attention
	Ne pas restériliser
	Craint l'humidité
	Conserver à l'abri de la lumière du soleil
	Dispositif Médical
	Numéro CE
	Consulter les instructions d'utilisation
	Fabricant
	Représentant autorisé dans l'Union européenne
	Importateur
	Distributeur
	Référence catalogue

Date de la dernière révision de la notice : 08-2021

Numéro de révision : 00

Référence : 990265 / 08-2021

Assembleur :

RAFFIN MEDICAL

746 route de Sarcey

69490 Saint-Romain-de-Popey, France



Distributeur :

AGETI France

30 Ch. des Tuileries

13015 Marseille – France

contact@ageti.fr



990265 / 08-2021

GAMME DE SETS DE PANSEMENTS POUR PLAIES CHRONIQUES

Pour d'autres tailles de plaies chroniques :

DÉSIGNATION	NOMBRE DE SOINS PAR BOÎTE	CODE EAN
SET DE PANSEMENTS POUR PLAIES CHRONIQUES Standard	5	3701063800237
SET DE PANSEMENTS POUR PLAIES CHRONIQUES Détersion	5	3701063800244